


clinical cases report.

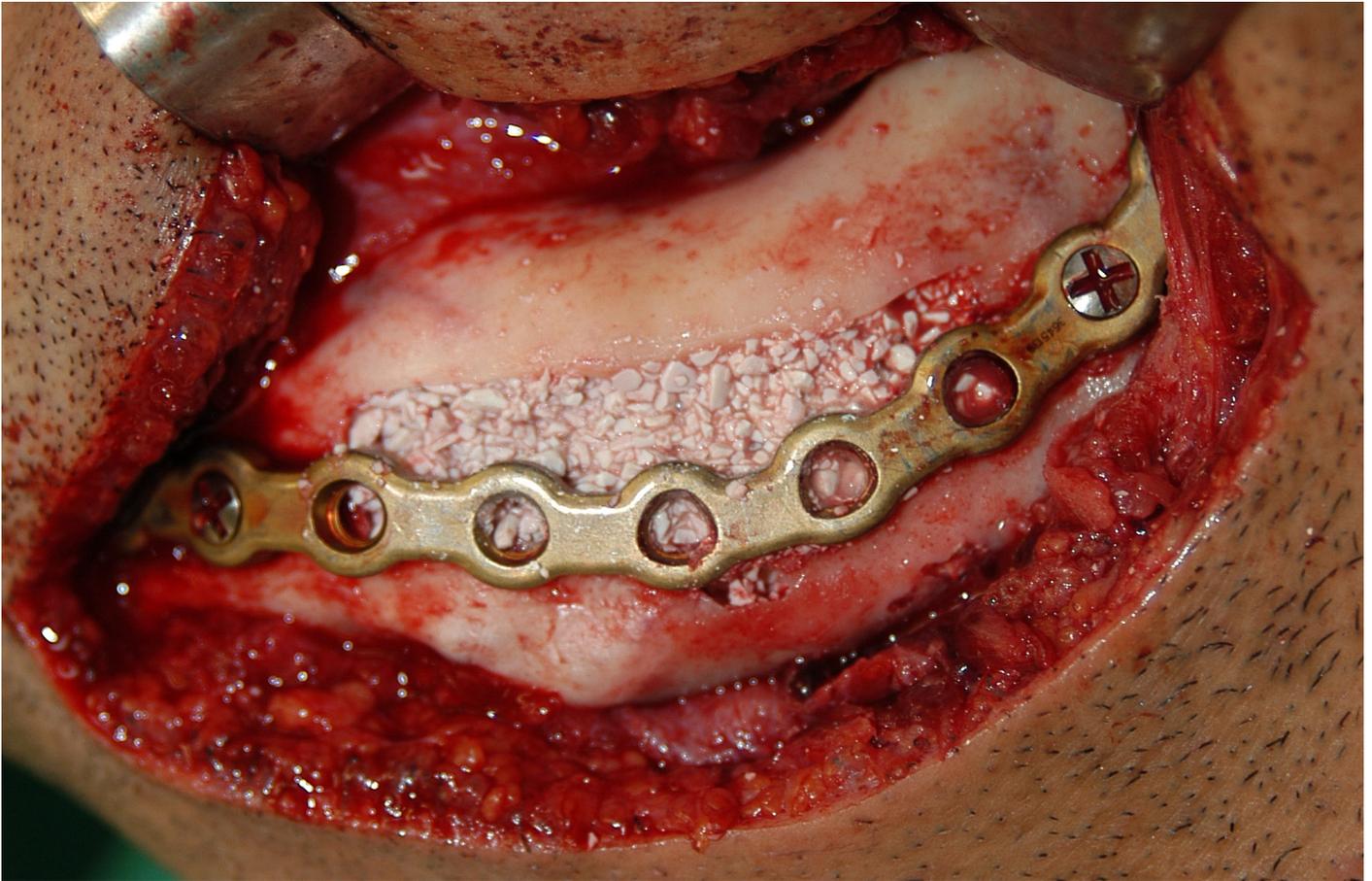

e.book daniel.nastri

”

A Bionnovation Biomedical é uma empresa brasileira que oferece soluções avançadas para a reposição de elementos dentais e reconstrução de tecidos. Atualmente, a linha de produtos é composta por implantes dentários e biomateriais capazes de proporcionar resultados clínicos e estéticos altamente satisfatórios.

Os biomateriais são produtos auxiliares nos processos de regeneração tecidual que apresentam soluções clínicas de excelente resultado, com elevado índice de sucesso e mínimo desconforto para o paciente.

A linha de biomateriais Bionnovation é composta por materiais alternativos para preenchimento nos procedimentos de enxertia óssea, membranas absorvíveis, barreiras não-absorvíveis, malhas de titânio, parafusos de enxertos e parafusos tendas.


Bionnovation
b i o m e d i c a l

W.A.S, 31 anos, sexo masculino

Ao EC, aumento de volume em região lingual do corpo mandibular E. Na radiografia panorâmica, apresenta lesão expansiva em corpo mandibular E e dente retido dentro da lesão. Na TC, lesão osteolítica em corpo mandibular E, com pequena expansão na vestibular e grande na lingual. NAI deslocado para basal. Feita exérese total da lesão sob anestesia geral. Incisão muscular com laser de diodo e descontaminação da loja cirúrgica com laser de alta potência. Colocação de placa de reconstrução + enxerto de hidroxiapatita com I-PRF [steak bone] + membranas de L-PRF e colágeno.

Follow-up: 24 meses


Produtos utilizados: Hidroxiapatita Cód 16034 Lote 056455

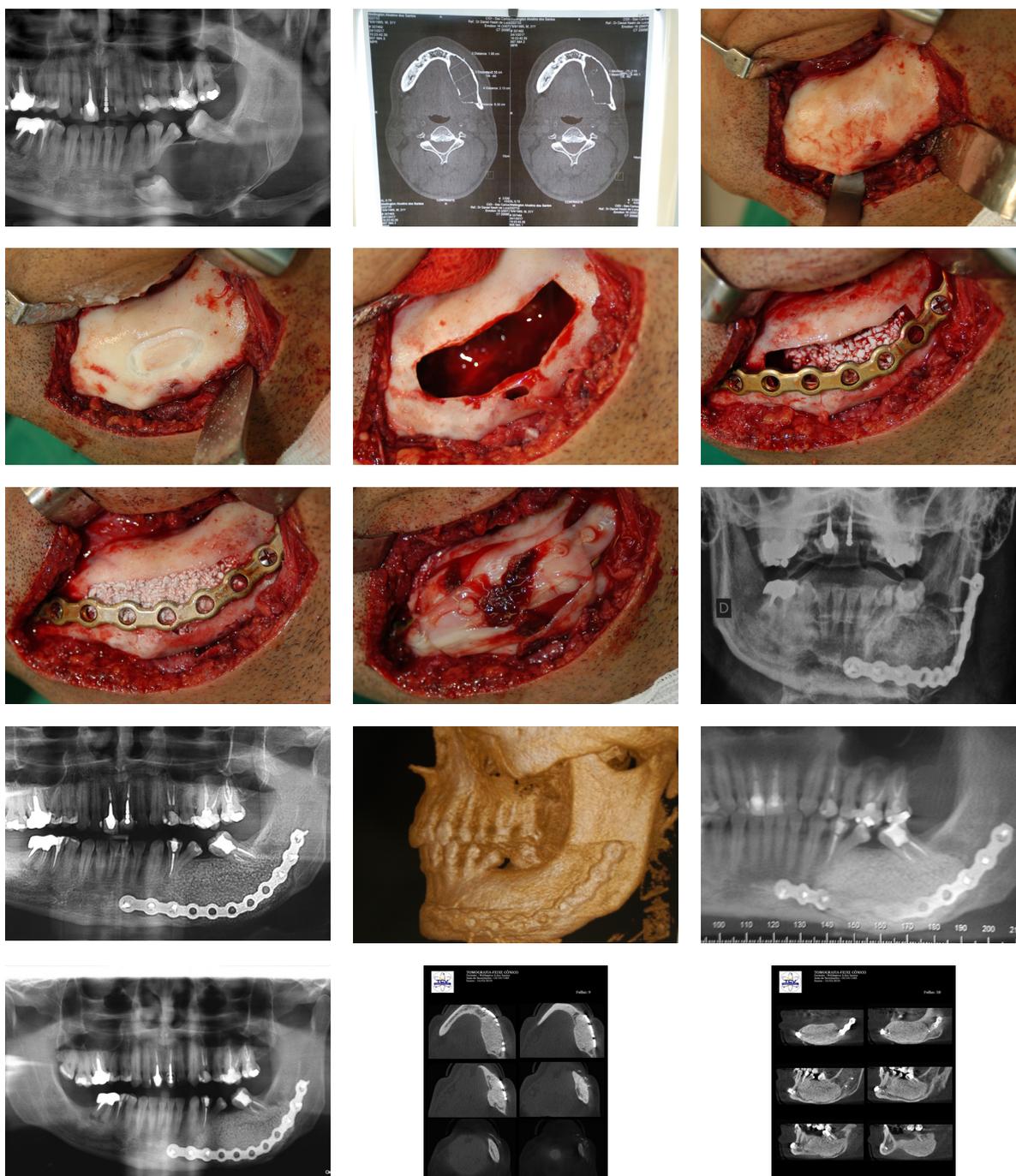

caso clínico cortesia daniel.nastri

Follow-up: 12 meses

Produtos utilizados: Surgitime PTFE Cód 16021 Lote 053637 | Bonefill Denso Grande Cód 16026 Lote 059226 - 057104

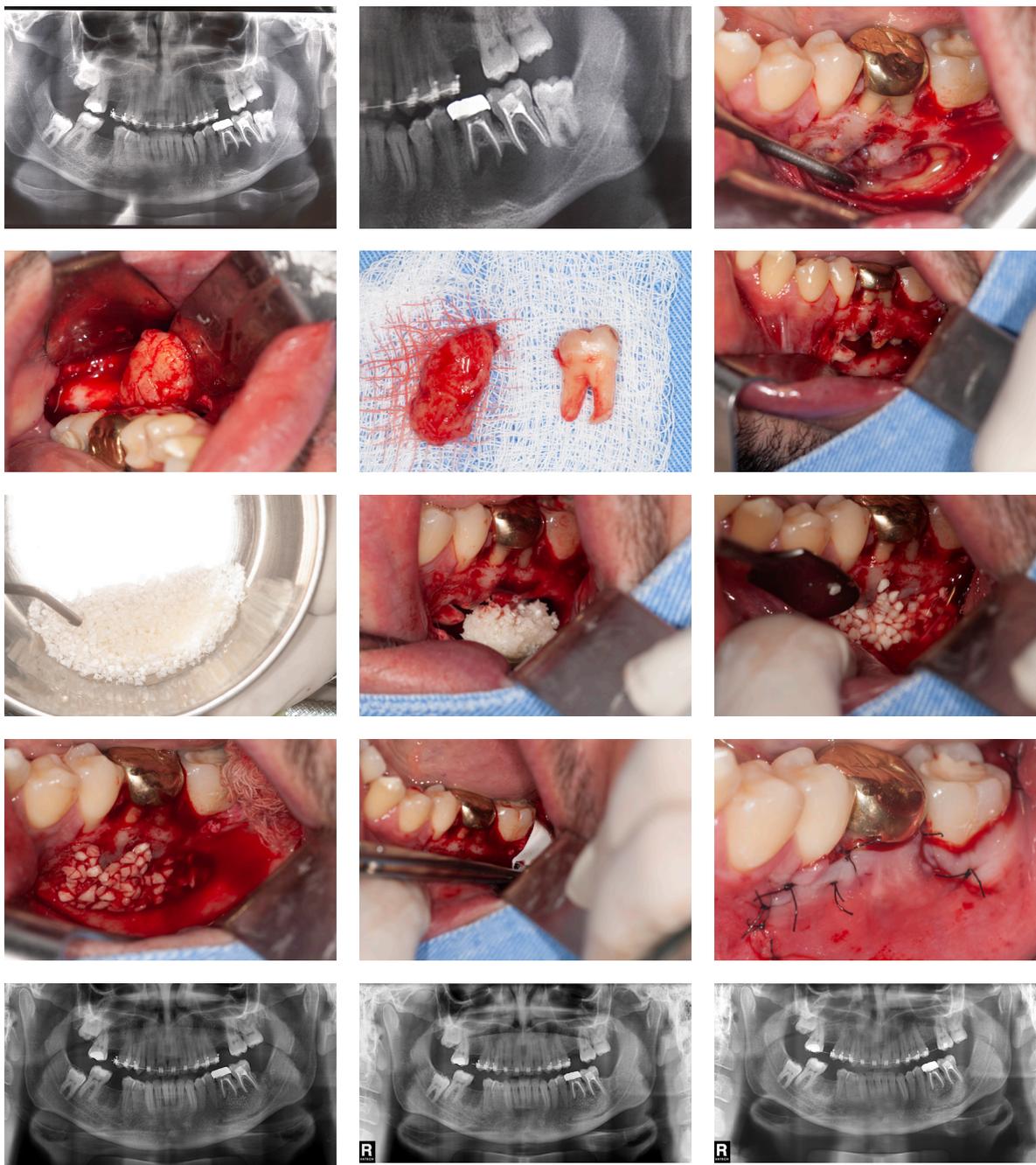

caso clínico cortesia daniel.nastri


P.T.C, 60 anos, sexo masculino.

Cisto Dentígero em Mandíbula.

Paciente encaminhado para avaliação de lesão em ramo mandibular E. Começou a sentir dores em dentes anteriores da mandíbula há 6 meses. Nega parestesia do NAI. Exérese de Cisto Mandibular e Colocação de Placa com Enxerto Ósseo e Membrana de L-PRF.

Follow-up: 15 meses

Produtos utilizados: Hidroxiapatita Cód 16034 Lote 056455

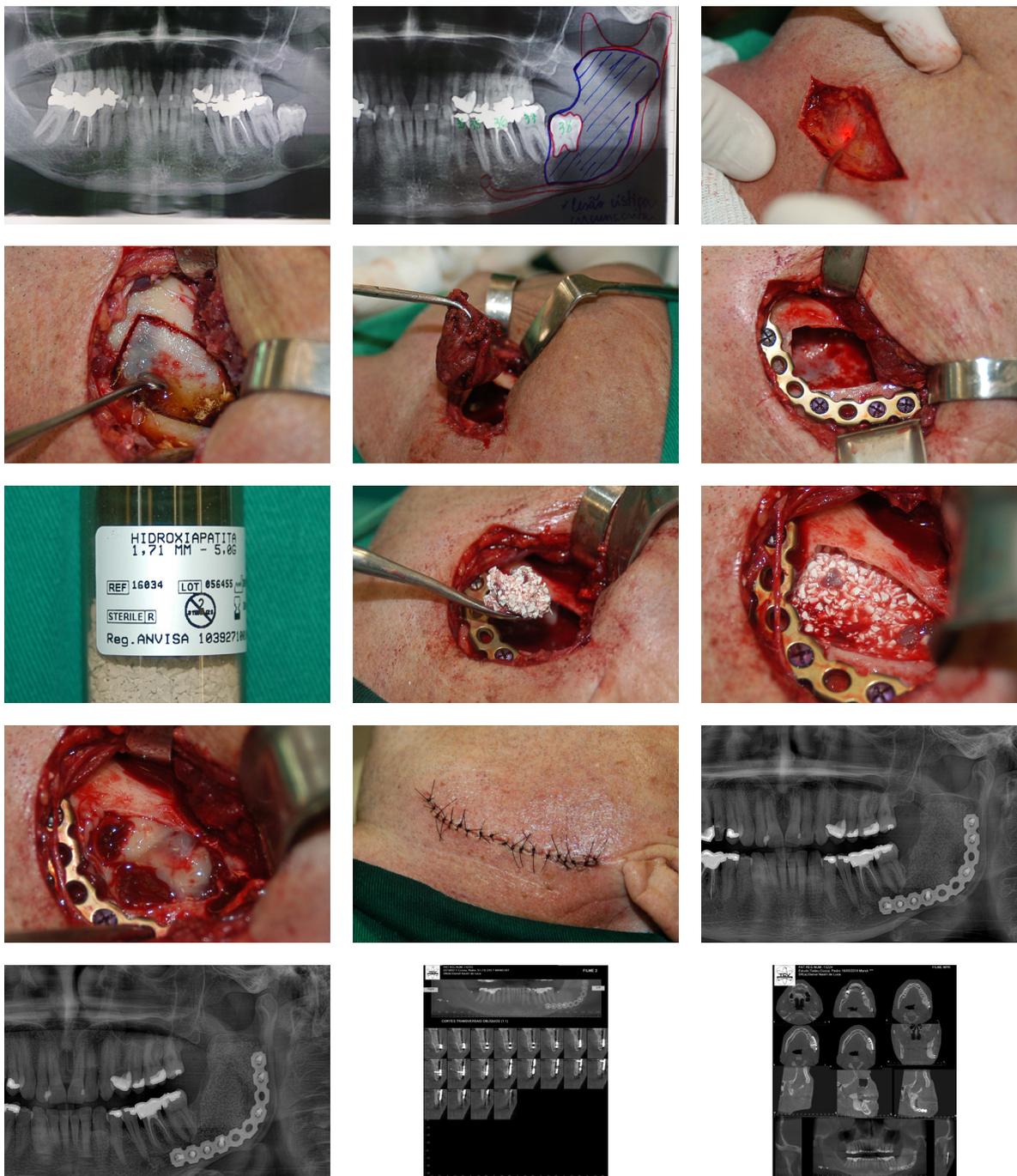

caso clínico cortesia **daniel.nastri**


M.C.M.S., 52 anos, sexo feminino.

Cisto em região mandibular D.

Paciente com dor em mandíbula D há 05 dias. Sofreu cirurgia para retirada de cisto em região retromolar há 05 meses e já havia sofrido outra cirurgia no mesmo lugar há 08 anos. Atualmente houve nova recidiva do cisto e paciente relata dor forte. É edentula total superior e parcial inferior posterior. Ao Rx PAN, apresenta lesão radiolúcida circunscrita em ramo mandibular D. Possível queratocisto. Acompanhamento 60 | 90 | 180 dias

Follow-up: 24 meses Rx PAN

Produtos utilizados: Hidroxiapatita Cód 16034 Lote 056455

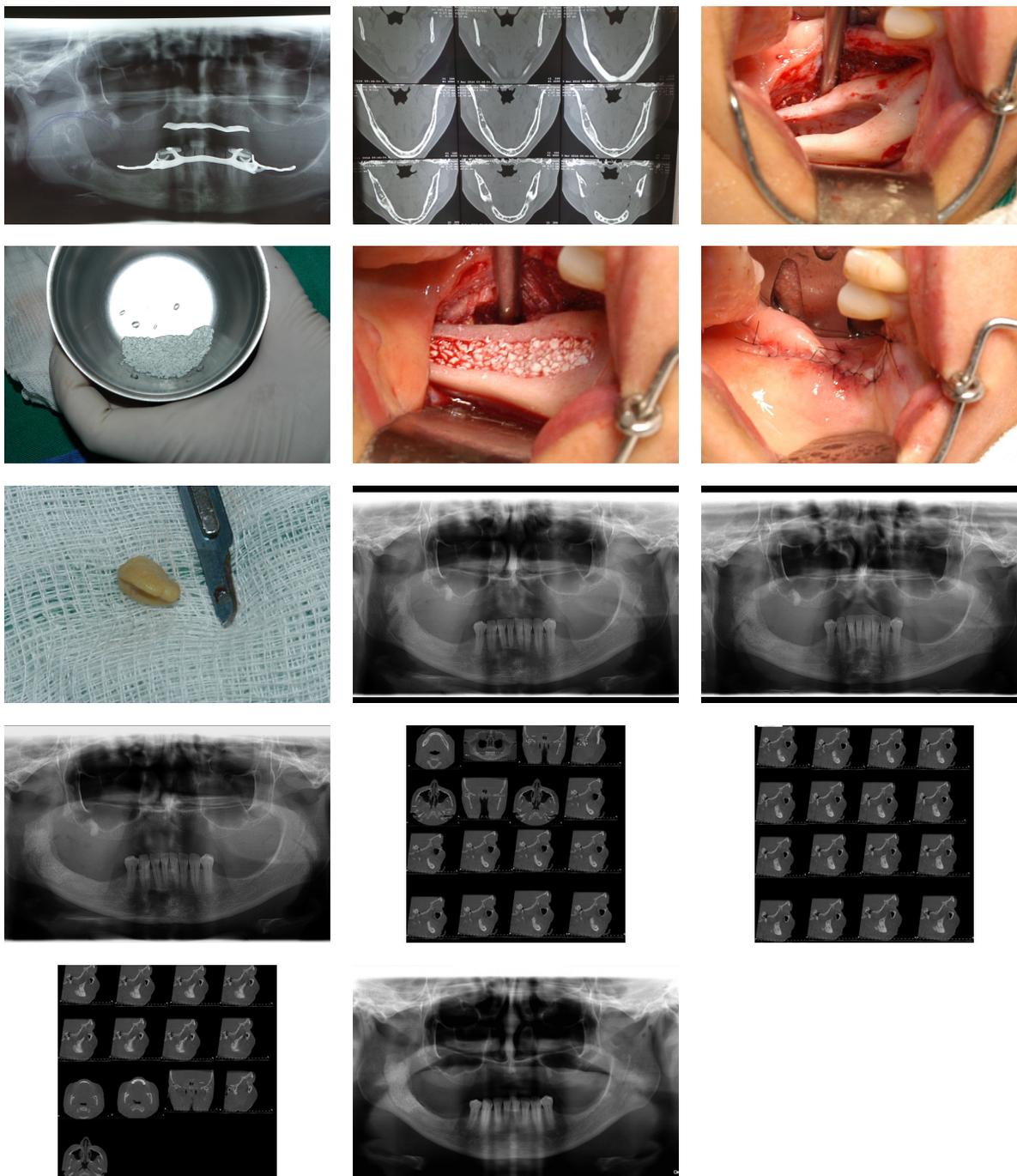

caso clínico cortesia **daniel.nastri**



A.R.M., 26 anos, sexo feminino.

Exérese de Lesão Fibro óssea em mandíbula.

Realização do procedimento cirúrgico para remoção de lesão mandibular esquerda, consentindo com o procedimento de enxertia óssea.

Follow-up: 14 meses

Produtos utilizados: Hidroxiapatita Cód 16034 Lote 055982

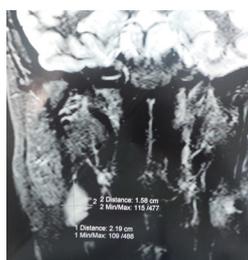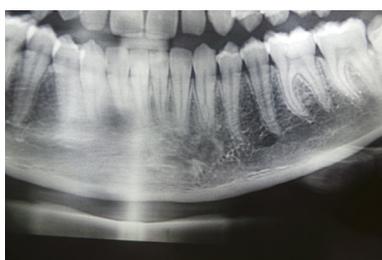

caso clínico cortesia [daniel.nastri](https://www.daniel.nastri.com.br)

